

Agiert bereits bei 1 Anwendung!

- Einfach zu verwenden
- Schädigt die umliegende Haut nicht
- Eignet sich für Kinder ab 4 Jahren

A. Hinweise

Die Behandlung mit Trosyd Wortie® zur Entfernung von Warzen ist ein rezeptfreies Produkt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen, das für Patienten mit einem Mindestalter von 4 Jahren geeignet ist.

B. Inhalt der Behandlung mit Trosyd Wortie zur Entfernung von Warzen an Händen und Füßen

Ein unter Druck stehender Behälter, der 50 ml flüssiges komprimiertes Dimethylethergas enthält und mit einer Metallspitze ausgestattet ist, um die Warze lokal zu vereisen.

Dieser Beipackzettel beschreibt die Funktion und die Verwendungsmethoden des Produkts und enthält Warnhinweise und Verwendungsbeschränkungen.

C. Grundlegende Informationen über Warzen

Gewöhnliche Warzen (auch vulgäre Warzen genannt) treten oft an den Fingern, am Handrücken, an den Ellbogen, an den Knien und auf der Oberseite der Zehen auf.

Man erkennt sie an ihrem rauen, „mosaikartigen“ Aussehen. Das Warzenvirus ist sehr ansteckend und kann durch direkten Kontakt mit der infizierten Haut von Mensch zu Mensch oder von einer Körperregion auf eine andere übertragen werden.

Dornwarzen ähneln stark den gewöhnlichen Warzen, treten allerdings ausschließlich an der Fußsohle oder auf der Unterseite der Zehen auf. Sie sind im Allgemeinen schmerzhaft und erscheinen in Form von kleinen weißen Ringen mit schwarzen Punkten in der Mitte auf der Haut. Auch Dornwarzen (Warzen an den Füßen) sind ansteckend und können durch Kontakt des infizierten Bereichs mit einer feuchten oder nassen Oberfläche, zum Beispiel eines Fußbodens, von Mensch zu Mensch übertragen werden.

D. Wie reagiert Trosyd Wortie

Trosyd Wortie® vereist gewöhnliche Warzen und Fußwarzen. Wenn der entsprechende kalte Applikator auf die Warze gedrückt (aufgetragen) wird, beginnt die Vereisung innerhalb weniger Sekunden und die Haut wird weiß. Als Folge der Vereisung kann es zu einem leicht schmerzenden, juckenden und/oder stechenden Gefühl kommen. Nach dem Entfernen des Applikators normalisiert sich die Farbe der Warze, das schmerzende, juckende oder stechende Gefühl lässt rasch nach und verschwindet innerhalb weniger Stunden komplett.

Sobald der behandelte Hautbereich wieder seine normale Temperatur erreicht und die Farbe sich normalisiert hat, kann es zu einer Rötung in der Größe des vereisten Bereichs kommen. Infolge der Vereisung kann es im Laufe einiger Tage unter der Warze zu einer Blasenbildung (manchmal mit Blut gefüllt) kommen. Diese ist nicht immer sichtbar.

Nach etwa 10-14 Tagen fällt die vereiste Haut zusammen mit der behandelten Warze ab. In der Zwischenzeit hat sich unterhalb der Warze neue Haut gebildet.

Trosyd Wortie zur Warzenentfernung wurde mit anderen „criteo rapid“ Produkten verglichen, um die Vereisungskraft zu bewerten. Die Ergebnisse sind in den nachstehenden Abbildungen sichtbar.

Gezielte Vereisung



Trosyd Wortie

Sonstige Marken

E. Was Sie vor der Anwendung von Trosyd Wortie wissen sollten

- Trosyd Wortie nicht im Gesicht, unter den Achselhöhlen, an der Brust, bei Leberflecken oder Muttermalen, an behaarten Warzen, an Genitalwarzen (auf dem Penis oder im Scheidenbereich), auf Schleimhäuten (wie z. B. im Mund, in der Nase, im Anus, an den Genitalien, an den Lippen, den Ohren oder in der Nähe der Augen) anwenden.
- Benutzen Sie Trosyd Wortie nicht, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht deutlich erkennen können.
- Verwenden Sie Trosyd Wortie nicht, wenn Sie die Information auf dem Behälter oder in diesem Beipackzettel nicht deutlich lesen können.
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Behandlung von Kindern immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

F. Wie wird Trosyd Wortie angewendet?


Tragen Sie Trosyd Wortie 1 Mal auf der Warze auf, wie in den Anweisungen in Abschnitt G angezeigt ist.

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen im Beipackzettel genau befolgen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur permanenten Schädigung der Haut und zur Narbenbildung sowie zur Schädigung der Nerven durch die exzessive Vereisung oder des Verlustes von Flüssigkeit führen.

- In den meisten Fällen ist eine Behandlung einmalig pro Warze ausreichend. Sollten Sie nach drei Behandlungen keine Besserung feststellen, konsultieren Sie Ihren Hausarzt.
- Warten Sie nach der Anwendung von Trosyd Wortie 14 Tage bis die Warze abfällt. Wenn sich die Warze in diesem Zeitraum nicht verändert, können Sie Trosyd Wortie ein zweites Mal anwenden.
- Warten Sie immer 14 Tage zwischen den Anwendungen ab.
- Reinigen Sie den Applikator immer nach Gebrauch mit einem in Alkohol getränkten Tuch.
- Möchten Sie mehrere Warzen behandeln, müssen Sie abwarten, bis die Metallspitze die Umgebungstemperatur erreicht hat, bevor Sie das Produkt auf anderen Warzen anwenden.

C. Anwendungshinweise

Für eine sichere und wirkungsvolle Behandlung müssen die angezeigten Zeiten exakt eingehalten werden. Es wird dringend empfohlen, einen Timer zur Verfügung zu haben und die Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie Trosyd Wortie verwenden.

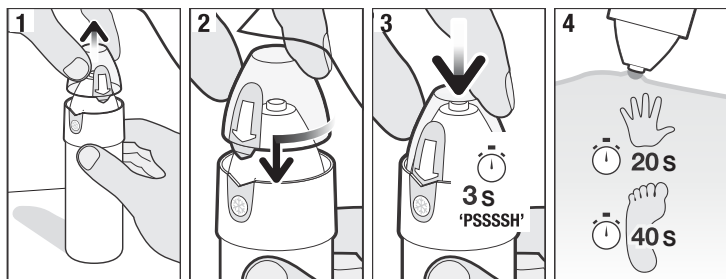

Reinigen Sie die Metallspitze nach Gebrauch, setzen Sie den Deckel auf und verschließen Sie ihn. Warten Sie 14 Tage ab, bis die Warze abfällt.

Für gewöhnliche Warzen und Fußwarzen

1. Nehmen Sie den Deckel ab und stellen Sie den Behälter auf einen Tisch oder eine andere ebene Fläche.

2. Belassen Sie den Behälter in der aufrechten Position. Drehen Sie den Deckel so, dass der Pfeil auf den am Behälter abgebildeten Eiskristall zeigt.
3. Drücken Sie den Deckel für 3 Sekunden nach unten (**nicht länger als 3 Sekunden**). Sie hören ein zischendes Geräusch, das die Aktivierung bestätigt.
4. Setzen Sie die vereiste Metallspitze exakt auf die Warze und halten Sie den Kontakt mit der Warze – je nach betroffener Stelle – für 20 Sekunden (Hand) oder 40 Sekunden (Fuß).

H. Vorsichtsmaßnahmen

Trosyd Wortie darf nicht verwendet werden:

- Wenn der Behälter während der Aktivierung nicht auf einer ebenen Fläche stand bzw.
- wenn Sie während der Aktivierung kein Zischen (Freisetzung von Aerosol) hören bzw.
- wenn das Zischen nach der Aktivierung anhält bzw.
- wenn die Metallspitze nach der Aktivierung nicht kalt wird (an der Metallspitze sollte eine Eisschicht zu sehen sein).

Für den Fall, dass eine oder mehrere der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, ist das Produkt möglicherweise nicht funktionstüchtig. Ein defektes Produkt kann zu Verletzungen oder einer unzureichenden bzw. unvollständigen Behandlung führen.

- Überschreiten Sie nicht die Behandlungszeit, d. h. 20 Sekunden für gewöhnliche Warzen und 40 Sekunden für Dornwarzen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie den Applikator auf die gewöhnliche Warze oder Dornwarze setzen.
- Wenn Sie mehr als eine Warze auf einem Finger oder Zeh haben, behandeln Sie diese bitte einzeln und nacheinander. Die Vereisung von mehreren Warzen auf einem begrenzten kleinen Hautbereich kann den Heilungsprozess verlängern oder es könnte zu einer nicht angemessenen Heilung dieses Bereichs kommen. Behandeln Sie jede eventuell verbleibende Warze einzeln, wobei zwei Wochen zwischen den Behandlungen liegen müssen.
- Das schmerzende/stechende Gefühl nach der Behandlung einer Warze verschwindet normalerweise innerhalb weniger Stunden nach der Anwendung. Wenn diese Beschwerden länger anhalten oder die Schmerzen stärker als erwartet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.
- Verwenden Sie Trosyd Wortie® nicht zusammen mit anderen Behandlungen zur Warzenentfernung, da die Wechselwirkungen auf der Haut nicht bekannt sind.
- Atmen Sie das austretende Aerosol nicht ein und wenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen an. Das Einatmen des Dampfes/Aerosols kann giftig sein.

I. Verhalten nach der Behandlung

- Halten Sie den behandelten Bereich sauber.
- Sie können duschen und schwimmen.
- Schaben und kratzen Sie nicht am behandelten Bereich, da dies zu einer Infektion führen kann.
- Falls notwendig, decken Sie die Blasen mit Gaze oder einem sterilen Pflaster ab.
- Stechen Sie die Blasen nicht auf, da dies schmerzhaft ist und zu Infektionen führen kann.
- Schützen Sie den Bereich vor Sonneneinstrahlung oder tragen Sie Sonnenschutzmittel auf (LSF 30 oder mehr).
- Versuchen Sie, Verletzungen der behandelten Stellen zu vermeiden, bis sie vollständig abgeheilt sind (d. h. bis zum Abfallen der Warze und bis zur Normalisierung der Hautfarbe).

J. Was tun, wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt?

Verwenden Sie Trosyd Wortie® nur dann, wenn Sie sich sicher sind, dass es sich um eine Warze handelt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Wenn Sie Trosyd Wortie® auf einem Hautwachstum, das keine Warze ist, anwenden, kann die Verzögerung der Durchführung einer geeigneten Behandlung zum Auftreten schwerwiegender Hautbeschwerden oder -erkrankungen führen. Lesen Sie deshalb die Abschnitte „Warnhinweise“ und „Kontraindikationen“ sorgfältig durch.

K. Nebenwirkungen

- Nach der Anwendung kann sich die Hautfarbe ändern und eine Farbe annehmen, die von weiß bis rot variieren kann. Unter der Warze kann sich eine Blase bilden und normalerweise tritt für wenige Stunden ein schmerzendes/stechendes Gefühl auf. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Hausarzt, sollte das schmerzende/stechende Gefühl über 24 Stunden andauern oder sollten andere Probleme (Vereisung außerhalb des betroffenen Bereichs oder eine geringere Empfindlichkeit) auftreten. Es ist normal, dass der behandelte Bereich einige Tage sensibler ist.
- Nach dem Ablösen der Warze kann es zu Depigmentierung oder der Bildung einer kleinen Narbe kommen.
- Nach einigen Tagen können schwarze Punkte in der Mitte der behandelten Warze auftreten.

Die Nutzung von Kryotherapie-Produkten zur Vereisung von Warzen kann aufgrund der niedrigen Temperaturen der Vereisung zu kleinen Brandwunden führen.

L. KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an Diabetes oder an Durchblutungsstörungen leiden. Trosyd Wortie® wirkt durch Vereisen der Warze. Bei Diabetikern und Menschen mit schlechter Durchblutung heilt der vereiste Bereich möglicherweise nur langsam oder unvollständig.
- Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden.
- Nicht an gereizter Haut oder in Bereichen anwenden, die infiziert oder gerötet sind oder Anzeichen einer Entzündung (z. B. Juckreiz oder Schwellung) zeigen. In diesen Fällen könnte es sich eventuell um keine Warze handeln: Für eine genauere Diagnose wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.

WARNHINWEISE

Extrem entzündbar. Unter Druck stehender Behälter. Die Flasche nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze / Funken / offenen Flammen / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen und an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Das Durchstechen oder die Einwirkung von Hitze kann zu einer Explosion des Behälters führen, die schwere Verletzungen verursacht. **Kontakt mit den Augen vermeiden.** Der Kontakt mit den Augen kann zu Erblindung führen. Nachdem Sie Trosyd Wortie® auf den Händen aufgetragen haben, nicht die Augen reiben oder berühren. Falls das Produkt in die Augen gelangt, müssen Sie die 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. **Zur äußerlichen Anwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** Kinder können die Anweisungen zur richtigen Verwendung dieses Produkts nicht verstehen.

Trosyd Wortie® zur Entfernung von Warzen enthält: Dimethylether

CE 0344

MEDIZINPRODUKT

Letzte Überarbeitung des Beipackzettels: März 2020

Das Produkt kann bis zum Verfalldatum benutzt werden, das sowohl auf der Verpackung als auch auf der Unterseite des unter Druck stehenden Behälters aufgedruckt ist.

Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.trosyd.it

Hersteller:

Trimb Healthcare, Barbara Strozziilaan 201,
1083 HN Amsterdam, Niederlande

Exklusivvertrieb:

Giuliani S.p.A.
Via P. Palagi, 2, 20129 - Mailand



PAP
Fallschachtel und
Beipackzettel
Papier
Getrennte Müllsammlung.
Überprüfen Sie die
Bestimmungen
Ihrer Gemeinde.