

A. Hinweise zum Gebrauch

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen (Hände) und Dornwarzen (Füße).

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster ist für Erwachsene und Kinder ab einem Alter von 4 Jahren angezeigt.

B. Grundlegende Informationen über Warzen

Warzen (auch bekannt als „gewöhnliche“ oder „vulgäre“ Warzen) sind kleine Hautwucherungen, die durch die humanen Papillomaviren (HPV) ausgelöst werden. Diese Infektion ist sehr ansteckend und kann durch direkten Kontakt mit dem infizierten Bereich von Person zu Person oder von einer Stelle am Körper auf andere Körperteile übertragen werden. Warzen treten oft an Fingern, am Handrücken, an den Knien oder an den Ellbogen auf. Man kann sie leicht an der „blumenkohlartigen“ Form erkennen.

Dornwarzen (Fußwarzen) treten an der Fußsohle oder unter den Zehen auf. Sie sind im Allgemeinen schmerzhaft und treten in Form von kleinen weißen Ringen mit schwarzen Punkten in der Mitte auf der Haut auf. Auch Dornwarzen sind ansteckend und können durch Kontakt mit einer feuchten oder nassen Oberfläche, zum Beispiel eines Fußbodens, übertragen werden.

Die gewöhnlichen Warzen oder Dornwarzen werden traditionell auf zwei Arten behandelt. Die erste besteht in der Verwendung von Lösungen auf säurebasis, wie beispielsweise Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster, die die Warzen aufbrechen und zerstören. Die zweite Methode besteht stattdessen in der physischen Zerstörung der Warze durch Laser oder dem Vereisen durch Kryotherapie, wie im Fall von Trosyd® Wortie®, einem Medizinprodukt, das wie Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht verschreibungspflichtig ist.

C. Was unterscheidet Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster von anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten?

Die einzigartige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, die auf der Grundlage veröffentlichter wissenschaftlicher Daten ausgewählt wurde, macht Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster wirksam und weniger aggressiv für die Haut. Die Lösung trocknet schnell auf der Haut und vermeidet dank eines sehr präzisen Applikatorpinsels eine Schädigung der umliegenden gesunden Haut. Das transparente Pflaster bedeckt die Warze nach dem Auftragen der Lösung und stellt sicher, dass die Flüssigkeit an der Applikationsstelle verbleibt und den behandelten Bereich schützt.

D. Wie funktioniert Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster?

Die GTA-Technologie (Glykolsäure + Trichloressigsäure + denaturierter Alkohol) ist einzigartig und exklusiv für Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster und wurde ausgehend von den jüngsten Studien zur Behandlung von Warzen und Dornwarzen entwickelt. Diese Studien wurden von einem Team von Fachärzten untersucht, die sie in ein innovatives und schnell anzuwendendes Produkt verwandelt haben.

• Kombination von wirksamen und sicheren Inhaltsstoffen

Die Rezeptur von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster besteht aus einer Mischung aus Säuren, die für ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen bekannt sind. Diese Komponentenkombination ermöglicht es Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster effektiv zu wirken und gleichzeitig weniger aggressiv für die Haut zu sein.

Die Rezeptur von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster hat eine zweifache Wirkung: 1. Sie schält die oberflächlichen Schichten der Warze und macht so die verhärtete Haut weich, so dass sie entfernt werden kann (Wirkstoff: Glykolsäure).

2. Sie sorgt für ein tiegehendes Peeling der Warzengewebe (Wirkstoff: Trichloressigsäure).

• Schnelle und punktgenaue Anwendung

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster trocknet schnell in etwa 30 Sekunden und vermeidet Hautverfärbungen oder -reizungen. Die präzise Spendebürste vermeidet Schäden an der umliegenden gesunden Haut.


- Einzigartige Mischung von 2 aktiven Inhaltsstoffen
- Brennt nicht
- Trocknet in wenigen Sekunden
- Nur 2 Anwendungen pro Woche
- Eignet sich für Kinder ab 4 Jahren

• Transparente Pflaster für den Schutz

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster enthält Pflaster, die zum Abdecken des behandelten Bereichs nach der Anwendung angezeigt sind. Die Pflaster sorgen dafür, dass die Warze mit den Wirkstoffen, die sie entfernen, länger in Kontakt sind. Darüber hinaus wirken die Pflaster als Schutzschicht, die dem behandelten Bereich hilft, sauber und geschützt zu bleiben, nicht berührt zu werden und die Warze selbst zu verbergen, was zu Unbehagen führen und das Risiko einer Ansteckung verringern kann.

E. Wie wird Trosyd® Wortie® Lösung und Pflaster angewendet?

Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich mit lauwarmen Wasser und Seife. Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Haut trocken ist.

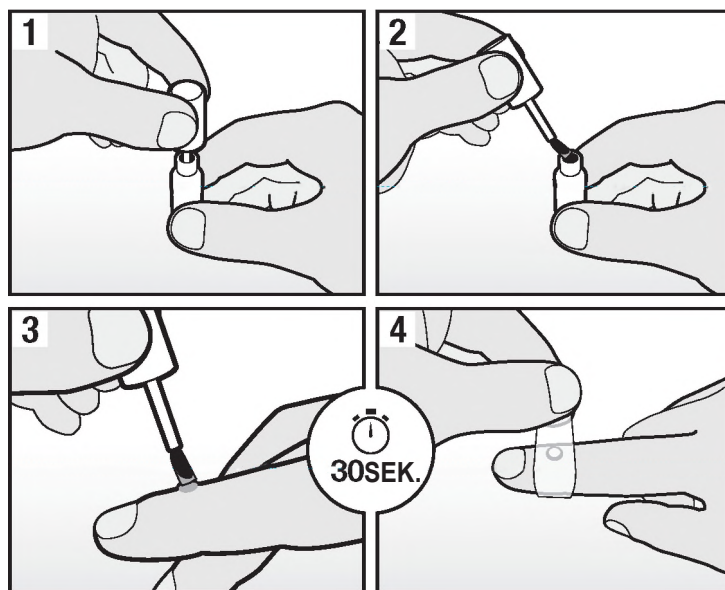

Stellen Sie die Flasche von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster auf eine ebene Fläche (zum Beispiel die Auflagefläche des Waschbeckens), um versehentliches Verschütten zu vermeiden.

1. Verwenden Sie den Applikatorpinsel von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster, vorsichtig eine dünne Schicht der Lösung auf die Warze auftragen. Vermeiden Sie das Auftragen der Lösung auf der umliegenden Haut. Sollte es jedoch dazu kommen, entfernen Sie die Lösung mit einem Taschentuch oder einem Tuch. Im Bedarfsfall können Sie den gesamten Bereich erneut mit lauwarmen Wasser und Seife reinigen und das Produkt erneut auftragen.
2. Lassen Sie die Lösung einwirken. Es reichen etwa 30 Sekunden aus.
3. Nachdem der behandelte Bereich vollständig getrocknet ist, können Sie das transparente Pflaster auf der Warze anbringen.
4. Lassen Sie das Pflaster an dieser Stelle für mindestens 4 Stunden oder so lange, bis es sich von selbst abzulösen beginnt. Sollte das Pflaster auf der Warze nach 24 Stunden noch haften, müssen Sie es vorsichtig ablösen und den Bereich mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen.
5. Tragen Sie das Produkt 2 Mal pro Woche wie beschrieben auf, bis die Warze komplett verschwunden ist.

Die Behandlungsdauer kann je nach Größe der Warze variieren. Während einige Warzen bereits nach 1 Woche Behandlung verschwinden, kann die Behandlung von größeren Warzen bis zu 8 Wochen dauern.

Es ist wichtig, dass die Anweisungen dieser Packungsbeilage korrekt befolgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu leichten Verbrennungen oder Hautreizungen führen oder die äußerste Hautschicht dauerhaft schädigen.

F. Warnhinweise:

- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen.
- Die Lösung nur auf die zu behandelnde Warze auftragen.

- Achten Sie darauf, die Lösung nicht auf die umliegende Haut um die Warze aufzutragen.
- Tragen Sie die Lösung nicht in Bereichen des Körpers mit dünner oder empfindlicher Haut wie Gesicht, Achselhöhlen, Brüste, Gesäß oder im Genitalbereich auf. Die Anwendung in diesen Bereichen könnte zu Hautreizungen führen bzw. Narben hinterlassen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht klar erkennen können; Wenden Sie sich an jemanden, der die Warze deutlich sehen und das Produkt daher korrekt auftragen kann.
- Verwenden Sie Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht, wenn Sie gegen einen oder mehrere Komponenten überempfindlich sind.
- Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.
- Nicht auf gereizter Haut oder in Bereichen des Körpers anwenden, die infiziert oder gerötet sind oder Anzeichen einer Entzündung wie Juckreiz oder Schwellung aufweisen.
- Die Behandlung dieser Bereiche mit Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster könnte den Zustand verschlechtern. In der Tat könnte es sich um ein anderes Problem als Warzen handeln, daher müssen Sie in diesen Fällen Ihren Hausarzt konsultieren. Werden andere Probleme als eine Warze mit Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster behandelt, kann es zu einer Heilungsverzögerung kommen. Diese Verzögerung könnte zu schwieriger zu lösenden Problemen führen.
- Nicht auf Hautflecken, Leberflecken, Muttermalen, haarbedeckten Warzen, Genitalwarzen (am Penis oder im Vaginalbereich) oder Warzen im Gesicht oder auf den Schleimhäuten (wie z. B. im Mund, in der Nase, im Anus, im Genitalbereich, an den Lippen, in den Ohren oder in der Nähe der Augen) anwenden. Die Anwendung in diesen Bereichen kann zu Verbrennungen und bleibenden Narben oder bei Augenkontakt zur Erblindung führen.
- Nicht wiederverwendbare Einwegpflaster.
- Nicht verwenden, wenn Sie die Informationen auf der Flasche oder dieser Packungsbeilage nicht sorgfältig lesen können.
- Verwenden Sie Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht zusammen mit anderen zur Entfernung von Warzen angezeigten Mitteln, da die daraus resultierende Wechselwirkung nicht bekannt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit oder wenn Sie an Diabetes oder Durchblutungsstörungen leiden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Berühren oder reiben Sie Ihre Augen nicht mit Ihren Händen, wenn diese mit Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster behandelt wurden. Falls das Produkt versehentlich in die Augen gelangt, müssen Sie diese sofort 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und dann umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Nicht schlucken. Der Inhalt ist giftig und kann schwere innere Schäden verursachen. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen oder sofort das Giftinformationszentrum kontaktieren.
- Zur äußerlichen Anwendung. Wenn Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht genau wie angegeben verwendet wird oder versehentlich direkt auf die Haut oder warzenfreien Bereiche aufgetragen wird, kann dies zu Hautreizungen und Narben führen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt selbstständig zu verwenden. Der Inhalt des Produkts kann gefährlich sein, wenn es verschluckt oder auf anderen Körperteilen als der Warze verwendet wird. Erstickungsgefahr - enthält Kleinteile.
- Entzündbar. Von Hitze / Funken / offenen Flammen / heißen Oberflächen fernhalten. An einem kühlen und trockenen Ort, bei Raumtemperatur und fern von Wärmequellen lagern.

G. Vorsichtsmaßnahmen

- Glykolsäure und Trichloressigsäure sind ätzende Säuren. Das Produkt nur an der Stelle der Warze auftragen, dabei die umliegende Haut vermeiden.
- Setzen Sie den behandelten Bereich keinen UV-Strahlen und direkter Sonneneinstrahlung aus, um Hautreizungen und Hyperpigmentierungen zu vermeiden. Die Verwendung des Schutzpflasters hilft dabei, den behandelten Bereich zu schützen.
- Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster könnte beim Kontakt mit Kleidung, Schmuck, Möbeln und Polsterungen diese beschädigen.
- Bei Entzündungen oder akuten Schmerzen und Entzündungen nach der Anwendung müssen Sie die Behandlung abbrechen, den Bereich sorgfältig mit Wasser und Seife waschen, um das Produkt von der Haut zu entfernen, und konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Apotheker Ihres Vertrauens.

- Wenn Sie nach einer oder mehreren Behandlungen eine anhaltende Rötung oder Entzündung feststellen, müssen Sie die Behandlung abbrechen und Ihren Hausarzt konsultieren.
- Die Verwendung einer übermäßigen Produktdosis kann zu Hautreizungen führen.
- Gehen Sie bei der Anwendung besonders vorsichtig vor.
- Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster kann von einem Erwachsenen bei Kindern ab 4 Jahren aufgetragen werden.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nach 3 Monaten aufeinanderfolgender Anwendung keine Besserung feststellen.
- Das Produkt darf nur von einer einzigen Person verwendet werden, um die maximal möglichen Hygienebedingungen aufrechtzuerhalten.

H. Mögliche Nebenwirkungen:

Wie andere Mittel zur Entfernung von Warzen kann Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster Nebenwirkungen hervorrufen, die jedoch nicht bei jedem behandelten Patienten auftreten.

- Während das Produkt wirkt, kann es zu einem leichten Kribbeln oder Brennen bzw. zu Schmerzen im behandelten Bereich kommen. Im Allgemeinen handelt es sich um vorübergehende Empfindungen, und nur in seltenen Fällen kann ein Hautfleck (Verdunkelung oder Rötung der Haut) auftreten.
- Brechen Sie die Behandlung ab und informieren Sie sofort Ihren Arzt oder den Apotheker Ihres Vertrauens, wenn sich die Symptome verschlimmern oder das Unbehagen zunimmt.
- Schützen Sie den behandelten Bereich vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung, um Hautreizungen und Hyperpigmentierungen zu vermeiden. Die Verwendung des Pflasters hilft dabei, den behandelten Bereich zu schützen.

I. Verhalten nach der Behandlung

- Halten Sie den behandelten Bereich sauber.
- Sie können duschen und schwimmen.
- Schaben und kratzen Sie nicht am behandelten Bereich, da dies zu einer Infektion führen kann.
- Setzen Sie den behandelten Bereich nicht dem Sonnenlicht aus.

J. Packungsinhalt von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster

1. Eine Flasche mit 5 ml Lösung. Die Lösungsmenge reicht für 18 Anwendungen aus, die die gesamte Behandlung abdecken.
2. 18 transparente Einweg-Schutzpflaster um die Warze nach dem Auftragen der Lösung abzudecken und zu schützen.

Diese Packungsbeilage enthält Informationen zu den Produktangaben sowie Warnhinweisen und Einschränkungen.

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster. Inhaltsstoffe: Denaturierter Alkohol, Glykolsäure und Trichloressigsäure.

CE0481

Letzte Überarbeitung: Juni 2018

Das Produkt kann bis zum Verfalldatum benutzt werden, das sowohl auf der Verpackung als auch am Etikett aufgedruckt ist.

Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.trosyd.it

Hersteller:	Exklusivvertrieb:
Trimb Healthcare,	Giuliani S.p.A.
Barbara Strozzi laan 201,	Via P. Palagi, 2,
1083 HN Amsterdam,	20129 - Mailand
Niederlande	Italien

Trosyd® Wortie® bietet zwei verschiedene Arten von Arzneimitteln zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen an, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ab 4 Jahren angezeigt sind:

Trosyd® Wortie® Kryotherapie - Isolierte Anwendung - kein direkter Kontakt zwischen Gas und Haut.

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster Lösung mit Applikatorbürste und Schutzpflastern - nur 2 Anwendungen pro Woche - trocknet schnell.