

- 2种活性成分的独特组合
- 不会灼热
- 几秒内干燥
- 每周仅使用2次
- 适用于4岁以上的儿童

A. 适应症

Trosyd® Wortie®溶液+贴片为一种医疗器材,适用于治疗寻常疣(手部)和跖疣(脚部)。

Trosyd® Wortie®溶液+贴片适用于成人和4岁以上儿童。

B. 关于疣的基本信息

疣被称为“寻常疣”或“水猴子”,是由人类乳头瘤病毒 (HPV) 引起的皮肤上的赘生物,具有很强的传染性,可以通过直接接触受感染的部位在人与人之间或从身体的一个地方传播到身体的其他部分。疣通常发生在手指、手背、膝盖或肘部。很容易通过其典型的“花椰菜”形状而识别出来。

跖疣发生在脚底或脚趾下。一般来说,跖疣会产生疼痛感,通常表现为一个白色的小圈,中间有黑色的小点。跖疣也具有传染性,可以通过接触潮湿或湿润的表面,如地板,在人与人之间传播。

传统上来说,寻常疣和跖疣有两种治疗方法。第一种方法是使用酸基溶液,如Trosyd® Wortie®溶液+贴片,该方法可以分解和破坏疣体。第二种方法是通过激光或冷冻疗法对疣体进行物理破坏,如Trosyd® Wortie®医疗器材,它与Trosyd® Wortie®溶液+贴片一样,不需要医生处方。

C. Trosyd® Wortie®溶液+贴片与市场上其他产品有何不同?

根据已公布的科学数据选择的独特成分,使Trosyd® Wortie®溶液+贴片十分有效,对皮肤的侵蚀性较小。溶液在皮肤上迅速干燥,由于非常精确的涂抹刷,避免了对周围健康皮肤的损害。透明的贴片会在涂抹溶液后覆盖在疣体上,确保液体保持在涂抹部位并保护治疗区域。

D. Trosyd® Wortie®溶液+贴片如何发挥作用?

GTA技术(甘醇+三氯乙酸+变性酒精)为Trosyd® Wortie®溶液+贴片所独有,是在治疗寻常疣和跖疣的最新研究中构思而出。经验丰富的医生团队对该成果进行了研究,并将其转化为创新和快速应用的产品。

· 有效和安全成分的组合

Trosyd® Wortie®溶液+贴片的配方由已知能有效治疗寻常疣和跖疣的混合酸组成。该成分组合使Trosyd® Wortie®溶液+贴片能够有效地发挥作用,同时对皮肤的侵蚀性较小。

Trosyd® Wortie®溶液+贴片的配方具有双重作用:1.能去除疣体表层的角质,从而软化硬化皮肤,使其得以去除(活性成分:乙醇酸)。

2.使形成疣体的组织进行深层剥离(活性成分:三氯乙酸)。

· 快速和精确的应用


Trosyd® Wortie®溶液+贴片在大约30秒内迅速干燥,避免变色或皮肤刺激。精确的涂抹刷防止对周围健康皮肤的损害。

· 用于保护的透明胶布

Trosyd® Wortie®溶液+贴片包含胶布,其设计用于在使用后覆盖治疗区域。该贴片使疣体更长时间地接触用于去除疣体的活性成分。此外,贴片作为一个保护层,使治疗区域保持清洁并受到保护,不被触摸,并隐藏可引起不适的疣体本身,以及减少感染的机会。

E. 如何使用Trosyd® Wortie®溶液+贴片?

用温肥皂水清洗需要治疗的部位。在使用前确保皮肤干燥。

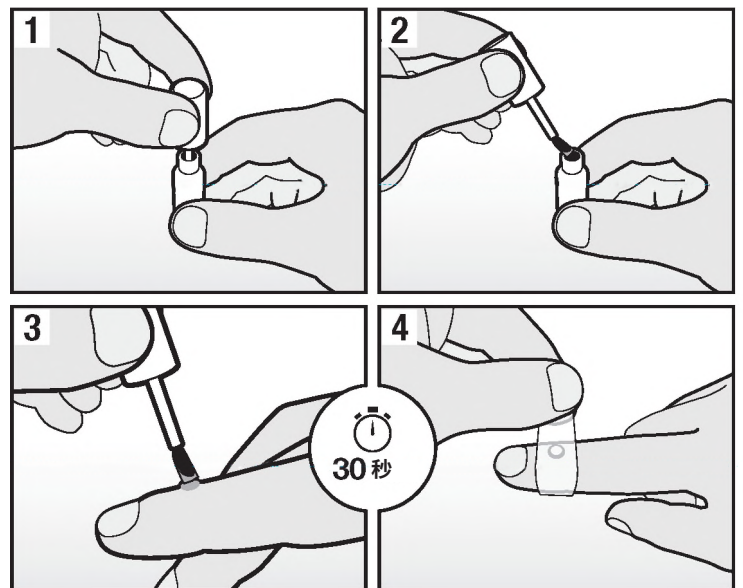

将Trosyd® Wortie®溶液+贴片的瓶子放在一个平坦的表面上(如水槽台面),以防止意外溢出。

1. 用Trosyd® Wortie®溶液+贴片的涂抹刷,将薄薄的溶液在疣体上仔细涂抹一层。避免将溶液涂在周围的皮肤上,如果发生这种情况,用纸巾或布将其擦去。如果有必要,用温肥皂水再次清洗整个区域,然后重新涂抹产品。
2. 使其干燥。大约30秒即已足够。
3. 一旦涂抹的区域完全干燥,将透明贴片在疣体上。
4. 将贴片留在原处至少4小时,或直至其开始自行剥落。如果24小时后贴片仍在疣体上,请小心地将其取下,用温肥皂水清洗该区域。
5. 按照说明每周使用该产品2次,直到疣体完全消失。

治疗时间可能会有所不同,这取决于疣的大小。虽然有些疣体在治疗1周后就会消失,但较大的疣体可能需要长达8周的治疗时间。

正确遵循本说明书中的指示是很重要的。使用不当可能会造成轻微烧伤或皮肤刺激,或对皮肤表皮造成永久性损害。

F. 警告:

- 仔细遵循指示。
- 只将溶液涂在要治疗的疣体上。

- 注意不要将溶液涂到疣体周围的健康皮肤上。
- 不要在皮肤较薄或敏感的身体部位上使用,如面部、腋下、乳房、臀部或生殖器部位。在这些区域使用可能会引起刺激和/或疤痕。
- 如果无法看到要治疗的确切疣体,请不要使用本产品;请求助能清楚看到疣体并能正确使用产品的人。
- 如果对一种或多种成分过敏,请不要使用Trosyd® Wortie®溶液+贴片。
- 请勿用于4岁以下的儿童。
- 不要用在受刺激的皮肤或身体任何受感染、发红或出现任何炎症迹象的部位,如瘙痒或肿胀。
- 用Trosyd® Wortie®溶液+贴片治疗这些部位可能会使病情恶化。事实上,这可能是一个疣不同的问题,因此应该咨询医生。用Trosyd® Wortie®溶液+贴片治疗疣以外的问题,意味着愈合可能推迟,这种推迟可能导致以后出现更复杂的问题。
- 不要用于皮肤斑点、痣、胎记、毛发覆盖的疣、生殖器疣(阴茎上或阴道内)或面部或粘膜上的疣(如口、鼻、肛门、生殖器部位、嘴唇、耳朵或眼睛附近)。在这些地方使用可能会造成永久性烧伤和疤痕,如果接触到眼睛可能会导致失明。
- 贴片为一次性,不可重复使用。
- 如果没有仔细阅读瓶子上或本说明书中的信息,请不要使用本产品。
- 请勿将Trosyd® Wortie®溶液+贴片与其他用于去除疣体的药物一起使用,因为所产生的综合效果尚不清楚。
- 如果是孕妇、处于哺乳期、糖尿病患者或循环功能不良,请不要使用本产品。
- 避免与眼睛接触。如果刚使用过Trosyd® Wortie®溶液+贴片,请不要用手触摸或揉搓眼睛。如果该产品不小心进入眼睛,请立即冲洗15分钟,然后迅速寻求医疗帮助。
- 请勿吞服。其内容物具有毒性,可能造成严重的内脏损伤。如不慎吞食,应立即寻求医疗帮助或联系毒物控制中心。
- 外用。如果Trosyd® Wortie®溶液+贴片没有完全遵照说明使用,或者不小心直接用于皮肤或无疣部位,可能会造成刺激和疤痕。
- 放在儿童接触不到的地方。不要让儿童独自使用本产品。如果吞食或用于身体没长疣的其他部位,产品的内容物可能造成危险。窒息危险 - 含有小部件。
- 易燃。远离热源/火花/明火/热表面。储存在阴凉、干燥的地方,在室温下,远离热源。

G. 预防性措施

- 乙醇酸和三氯乙酸是具有腐蚀性的酸。仅在疣体部位涂抹,避免周围区域。
- 避免将治疗区域暴露在紫外线和阳光直射下,以避免刺激和色素沉着。使用贴片将有助于保护治疗区域。
- Trosyd® Wortie®溶液+贴片如果与衣服、珠宝、家具或装饰品接触,可能会产生损坏
- 如果使用后发现炎症或急性疼痛和炎症,请停止治疗,用肥皂和清水彻底清洗该部位,从皮肤上清除产品,并咨询信任的医生或药剂师。

- 如果在一次或多次治疗后观察到持续的红肿或炎症,请停止治疗并咨询医生。
- 使用过多的产品可能会引起刺激。
- 使用时要特别小心。
- Trosyd® Wortie®溶液+贴片可由成人应用于4岁以上的儿童。
- 如果连续使用3个月后发现没有改善,请咨询医生。
- 本产品只能由一个人使用,以保持最佳的卫生条件。

H. 可能产生的副作用:

与其他去除疣体的措施一样,Trosyd® Wortie®溶液+贴片也会引起副作用,但这些副作用不会发生在每个接受治疗的人身上。

- 在产品发挥作用时,治疗部位可能会感到轻微的刺痛或烧灼感和/或酸痛。一般来说,这些都是暂时性的感觉,只有在极少数情况下可能出现皮肤斑点(皮肤变黑或变红)。
- 如果症状加重或不适感增加,请停止治疗并立即告诉信任的医生或药剂师。
- 保护治疗区域不受阳光和紫外线的直接照射,以避免刺激和色素沉着。使用贴片将有助于保护治疗区域。

I. 治疗后的行为

- 保持治疗区域的清洁。
- 可以游泳和洗澡。
- 不要刮擦或抓挠治疗部位,因为这可能导致感染。
- 避免将治疗区域暴露在阳光下。

J. Trosyd® Wortie®溶液+贴片的包装内容

1. 一瓶含有5毫升的溶液。溶液的量足够18次使用,覆盖整个治疗。
 2. 18个保护性、透明、一次性贴片,用于在使用溶液后覆盖和保护疣体。
- 本信息说明书包含有关产品适应症的信息以及警告和限制。

Trosyd® Wortie®溶液+贴片。成分:变性乙醇,乙醇酸,三氯乙酸。

CE0481

最后修订:2018年六月

本产品可以使用到包装袋和标签上显示的有效日期。

欲了解更多信息,请访问www.trosyd.it

制造商:

Trimb Healthcare,
Barbara Strozzi laan 201,
1083 HN Amsterdam,
荷兰

独家经销商:

Giuliani Spa
Via P. Palagi, 2,
20129 - Milano
意大利

Trosyd® Wortie®提供两种不同类型的去除寻常疣和跖疣的方法,均适用于成人和4岁及以上儿童:

Trosyd® Wortie® 冷冻疗法-1次使用-气体和皮肤之间没有直接接触。

Trosyd® Wortie®溶液+贴片 带有涂抹刷和保护贴片的溶液--每周只需使用2次--迅速干燥。