

# TROSYD® REPAIR

FERITE, ABRASIONI, USTIONI, EMATOMI



## CREMA

### DESCRIZIONE

Trosyd® Repair è un dispositivo medico ad uso topico contenente T-Lysyal® (Aggregato Supramolecolare). Modulatore biologico delle strutture cutanee: derma ed epitelio. Modula il processo di riparazione delle lesioni dermo-epidermiche grazie alla capacità di riattivazione dei processi rigenerativi.

Trosyd® Repair è una crema da utilizzarsi come coadiuvante nella terapia delle: abrasioni ed escoriazioni cutanee, ustioni, ferite, ematomi e peeling chimici. T-Lysyal®, presente nel dispositivo, ha la capacità di aumentare l'idrodinamica tissutale, esaltando la capacità igroscopica della catena polimerica dell'Acido Ialuronico, costituente strutturale fondamentale della matrice extracellulare (ECM). Esso contribuisce a mantenere la matrice idratata supportandone inoltre l'integrità strutturale. Data l'elevata igroscopicità, le soluzioni di T-Lysyal® hanno elevata capacità di trasporto molecolare, riproducendo più da vicino l'azione fisiologica dell'acido ialuronico endogeno, inducendo un incremento dell'idratazione del derma, una facilitazione del turnover cellulare e la rimozione dei radicali liberi: tutto questo favorisce i processi di riparazione e di rigenerazione delle lesioni dermo-epidermiche.

### INDICAZIONI

Coadiuvante dei processi riparativi e lesioni cutanee, accelera la guarigione e la rigenerazione della cute. Inoltre agisce idratando gli strati superficiali della cute ripristinando l'equilibrio osmotico-cellulare.

Trosyd® Repair coadiuva il processo riparativo nelle seguenti condizioni:

- ABRASIONI ED ESCORIAZIONI CUTANEE
- USTIONI E SCOTTATURE
- FERITE
- FISSURAZIONI E RAGADI CUTANEE
- EMATOMI ED EDEMI
- PEELING CHIMICI

### COMPOSIZIONE

T-LysYal® (Aggregato Supramolecolare di hyaluronic acid, lysine, thymine, sodium chloride). **Altri ingredienti:** aqua, ethylhexyl stearate, glyceryl stearate, ethylhexyl palmitate, dimethicone, propylene glycol, cetearyl alcohol, cyclopentasiloxane, glycolic acid, PEG-100 stearate, triethanolamine, sorbitan stearate, stearic acid, methylparaben, propylparaben, sodium dehydroacetate, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid.

### MODO D'USO

Pulire le mani prima di procedere.

Pulire la ferita con soluzione fisiologica.

Stendere un sottile strato del prodotto sull'intera superficie lesa, principalmente sui bordi. Proteggere il tutto con medicazione secondaria, preferendo garze grasse per il contatto diretto con la lesione.

Ripetere l'applicazione 1-2 volte al giorno fino a completa guarigione.

Su edemi ed ematomi, stendere, senza massaggiare, un sottile strato 2-3 volte al giorno senza bendaggio.

## AVVERTENZE

Il prodotto è destinato ad un uso esterno.

La medicazione con Trosyd® Repair prevede il rispetto delle più comuni norme di igiene e asepsi, lavarsi quindi accuratamente le mani prima di procedere alla sua applicazione su cute lesa.

La pulizia della zona lesa deve essere eseguita solo con soluzione fisiologica al fine di rimuovere eventuali corpi estranei, mentre l'eccesso di secrezione e/o di sangue deve essere tamponato con compresse di garza.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Non ingerire.

La data di scadenza indicata in etichetta si riferisce al prodotto chiuso e correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

## CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI INDESIDERATI

Il prodotto è controindicato in soggetti che presentino intolleranza/ipersensibilità ad uno qualsiasi dei componenti.

Appena applicato su cute lesa, si può avvertire un senso di bruciore che tende a risolversi spontaneamente dopo pochi secondi.

Nel caso comparissero effetti indesiderati diversi da quelli descritti, sospendere l'applicazione e consultare il proprio medico.

## GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO

Pur non essendo noti effetti di Trosyd® Repair crema in corso di gravidanza e/o di allattamento, l'applicazione del prodotto in questi casi è subordinata al giudizio del medico.

## MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo da fonti di calore.

## CONFEZIONI

Crema tubo da 25 ml

Dispositivo Medico CE 0373 - CL IIB

**Fabbricante:** SILDEHA Pharma Srl, via Egadi 7, Milano (IT)

**Distributore:** Giuliani S.p.A., via P.Palagi 2, 20129, Milano (IT)

